


Manuel d'utilisation Anya Cariss

1. Votre alarme Cariss

L'Anya Cariss est branchée sur secteur et connectée à votre routeur et/ou à un réseau mobile via une carte SIM active. Cela vous permet de lancer un appel d'urgence vers une centrale d'alarme compétente, qui appellera ensuite les secours si nécessaire

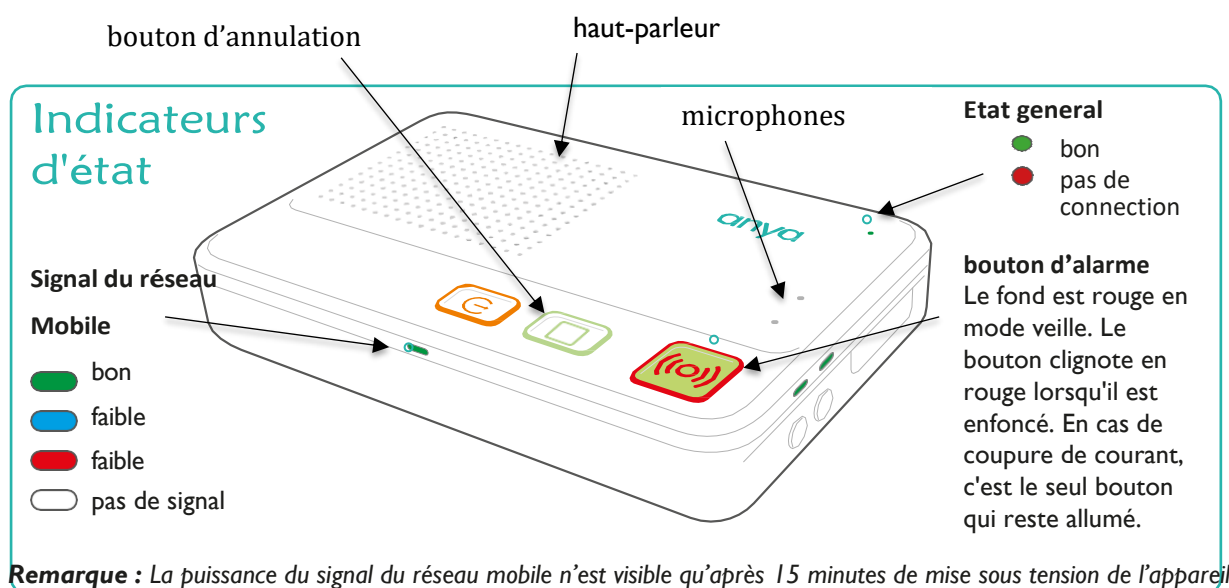

2. Votre déclencheur personnel


Votre déclencheur personnel communique par radio avec votre terminal de téléassistance et permet d'émettre un appel à l'intérieur de votre habitation et à proximité immédiate (jardin, dépendances). Le déclencheur doit être porté en permanence autour du cou ou au poignet en utilisant les accessoires fournis à cet effet. Le déclencheur qui est un émetteur radio est étanche (IP67) jusqu'à 1m de profondeur. Il peut être porté sous la douche.



** L'émetteur personnel envoie automatiquement un message au centre de contrôle via le Cariss lorsque la tension de la batterie est faible.

3. Émettre un appel d'urgence

- Appuyez sur le bouton d'alarme ou sur un émetteur appairé. Un message vocal sera alors diffusé "Ne vous inquiétez pas, votre terminal est en train d'émettre un appel". En même temps, la LED de votre émetteur s'allumera également en rouge.

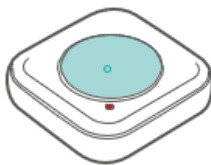

- Le bouton d'alarme clignote en rouge et un appel est immédiatement lancé vers la centrale d'alarme.
- Vous pouvez parler avec l'opérateur via le haut-parleur. Si possible, dites à l'opérateur pourquoi vous avez appelé à l'aide et il organisera alors une assistance.

4. Annulation d'un appel

Attendre 5 secondes (après avoir pressé le bouton d'alarme) puis presser le bouton vert d'annulation. Le terminal annoncera alors "l'alarme d'urgence a été annulée". Cette temporisation est prévue pour empêcher tout annulation accidentelle.

5. Appel involontaire

Si vous déclenchez par erreur un appel, ne vous inquiétez pas car votre prestataire de téléassistance est toujours heureux d'être à votre écoute. Cet appel involontaire peut d'ailleurs servir à tester votre matériel.

6. Insertion et retrait de la fiche d'alimentation

La fiche d'alimentation de l'alarme Cariss est spécialement conçue pour garantir une connexion fiable et éviter tout débranchement accidentel.

Suivez les étapes ci-dessous pour insérer et retirer correctement la fiche d'alimentation.

Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni par Anya avec l'alarme Cariss!

Etape 1

Vérifiez les deux ergots d'alignement sur le cylindre argenté de la fiche.

Ils doivent être alignés avec les fentes correspondantes du connecteur de l'alarme Cariss.

Etape 2

Insérez la fiche dans le connecteur et tournez-la dans le sens horaire jusqu'à ce que les ergots soient alignés et que la fiche puisse être enfoncée davantage.

Etape 3

Enfoncez la fiche jusqu'à ce que le cylindre argenté ne soit plus visible et que la fiche soit complètement insérée.

Etape 4

Tournez la fiche de 90 degrés dans le sens horaire pour la verrouiller

Etape 5

Tirez légèrement sur la fiche pour vérifier qu'elle est bien verrouillée.



Pour retirer l'adaptateur secteur, vous devez effectuer l'inverse de l'étape 4, à savoir le tourner de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis tirer légèrement sur la fiche

Ne tirez jamais fort sur le cordon pour retirer la fiche.

7. Aide et conseils

A faire

- Portez en permanence votre déclencheur
- Testez régulièrement votre terminal de téléassistance
- Laissez le terminal branché en permanence sur une prise secteur
- Nettoyer le terminal et le déclencheur avec un chiffon doux qui peut, si nécessaire, être humidifié avec un détergent non agressif.

A ne pas faire

- Exposer le terminal à l'eau ou à d'autres liquides.
- Utiliser d'autres câbles que ceux fournis avec le terminal
- Bouger le terminal de l'emplacement initial où il a été installé.
- Placer le terminal à proximité d'objets qui peuvent générer du bruit, de la chaleur, ou qui sont métalliques : radios, machine à laver, micro-ondes, routeur WiFi, téléphone portable, ordinateur portable etc.